



抗体検査キット説明書


- 1 全て揃っているか確認してください。

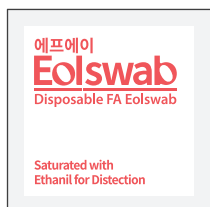

■アルコールパッド(1袋)

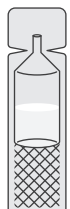


■希釈液

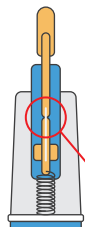

■ランセット
(皮膚穿刺器具)


使用前にキャップを
ゆっくり回しながら
引き抜いて下さい。

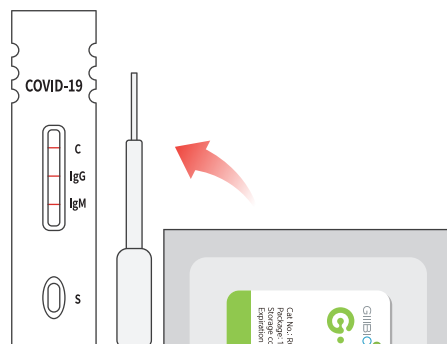


■検査キットとスポイト
(袋から取り出す)

★開封後、そのまま速やかに使用してください。

- 2 ランセットのキャップを優しく指でつまみ、斜めにねじらず真すぐにゆっくり5回～6回ほど回してから、そっと引き抜くように外す。

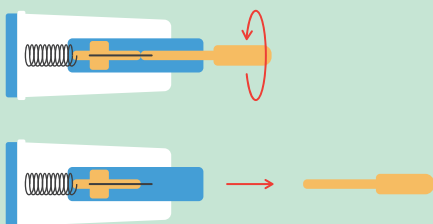

- 3 希釈液が入った容器のキャップを回して開封する

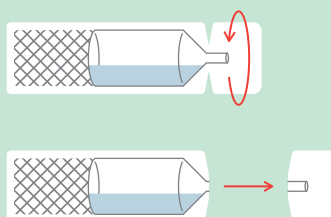

回してねじり
切るように取る。
中の液が漏れない
ように注意する。

- 4 アルコールパッドで薬指をキレイに拭く。



- 5 乾いたら、薬指(指の選択は自由)の指先に血液を集めるように、指で押しながらマッサージする。




指の中心線を指の
付け根から
指先へ向かって、
指先に血液を
集めるように
マッサージする。


- 6 ランセットの先を指先の中心部分にしっかりと当て、押し込む。



- 7 指先の血液が米粒くらいの球状になるように、指の付け根から指先へ向かって繰り返し指で押し出す。また、付け根から押し出しながら、指先の両側面を摘み指先の血液を絞り出す。

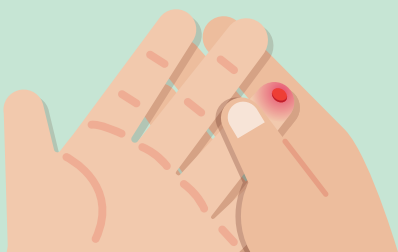


- 8 スポイトで軽く吸い取り、検査キットのS窓に滴下する。
※血液が少ないと結果がはっきり出ない場合があります。
S窓全体に血液が染み渡る程度の滴下を推奨します。

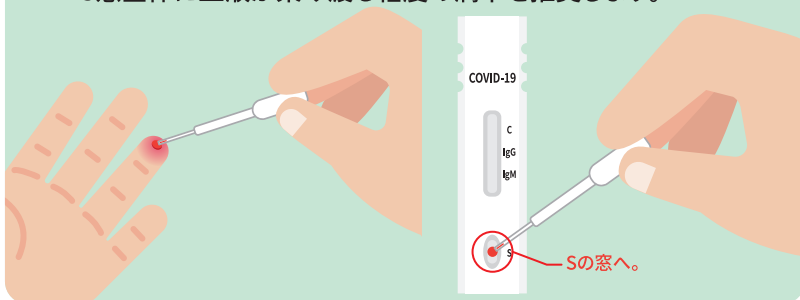

Sの窓へ。


9 同じS窓に希釈液を3滴～4滴入れる。

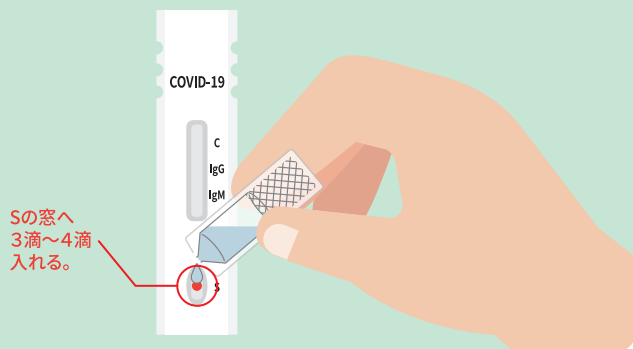

10 最後にアルコールパッドで薬指をきれいに拭く。




血液と希釈液の滴下後、
15分経過したら
結果が確認できます。

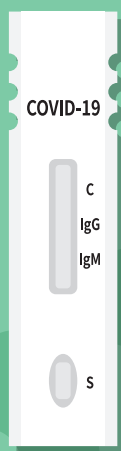


IgM抗体陽性は直近の感染を示し、
IgG抗体陽性はより長期間の感染
または以前の感染を示します。

陰 性

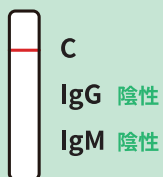


ウイルス未感染


陽 性

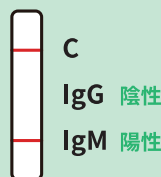

感染初期

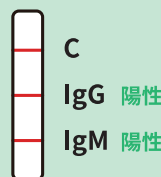

感染中～後期

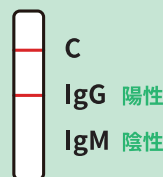

感染後(免疫状態)

無 効



Cのラインが出ない
場合は無効
<再検査が必要>

陽性反応が出たら保健所、または医療機関に相談してください。

「IgG」「IgM」のどちらかに「陽性」判定が出た方は、すでに新型コロナウイルスの抗体を持っていると考えられます。

しかし、抗体を持っていても再感染しないということではありませんのでご注意ください。

「IgG」「IgM」どちらも「陰性」の場合は、体内に抗体がないため、新型コロナウイルスに感染していた可能性が低く、今後の感染リスクがあるため注意が必要です。

不安な場合は、メールまたは電話にて医療機関にご相談ください。



針は医療廃棄物になるので、担当医療機関に返還ください。もしくは医療廃棄物として処分してください。

保管条件と有効期間

- キットは高温多湿を避け、2～30℃の涼しくて、乾燥した場所に保管してください。
- 凍結しないでください。
- 適切な条件で保管されたキット（または箱）は2年間有効です。（製造年月日については、キットが入っているアルミの袋に記載しております）。
- 適切な条件で保管されていても有効期限が切れたキットは使用しないでください。